



auditech
INNOVATIONS



Antibruit Moulés sur Mesure

L'entretien de vos protections auditives
EarPro®

Vos adaptateurs moulés sur mesure ne nécessitent pas d'entretien particulier pour leur bon fonctionnement.

Leur hygiène se fait facilement en dépliant les filtres et en nettoyant les adaptateurs silicone à l'eau et au savon doux. (Le nettoyage peut-être journalier.)



Pour les plus exigeants ou en réponse à la réglementation une gamme de produits a été spécialement étudiée :
La gamme EarClean®

EarClean Towels



- **Lingettes nettoyantes**
Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique pour le nettoyage quotidien des embouts en silicone.

- **Conditionnement**
Boîte de 10 lingettes.
Boîte distributrice de 250 lingettes.

EarClean Caps



- **Pastilles effervescentes**
Pastilles pour l'hygiène des embouts silicone par asepsie en profondeur.

- **Conditionnement**
Boîte de 20 pastilles.

EarClean Gel



- **Gel lubrifiant**
Lors des premières utilisations de vos EarPro®, l'application d'EarClean Gel facilite l'insertion de vos embouts.

- **Conditionnement**
A l'unité tube de 5ml.

Les Set Hygiène

1 mois

- ⇒ 4 EarClean Caps (Pastilles effervescentes)
- ⇒ 5 EarClean Towels (Lingettes nettoyantes)



3-6 mois

- ⇒ 20 EarClean Caps (Pastilles effervescentes)
- ⇒ 30 EarClean Towels (Lingettes nettoyantes)



auditech
INNOVATIONS

Préservez votre
capital auditif,
Protégez-vous !

36 rue de la Forge Féret – BP 90 – 76520 BOOS – Tél : (0)2.35.60.57.24 – Fax : (0)2.32.08.42.83
www.auditech-innovations.fr – info@auditech-innovations.fr