



Lingette désinfectante

Bactéricide-Fongicide-Virucide

Médical-Agroalimentaire-Industrie

AA-2075



DOMAINE D'APPLICATION

Aawyx® Lingette Désinfectante Bactéricide-Fongicide-Virucide à usage unique est un produit destiné au nettoyage, à la décontamination et désinfection par contact de toutes les surfaces, matériels, gants jetables, Idéal en période de pandémie dans tous les domaines de la santé publique.

Medical : matériel, surfaces : ambulance, plans de travail, stéthoscope, otoscope et petits matériels entre deux patients, sonde d'échographie, sonde alimentaire, thermomètre digital, gaine d'endoscope, matelas anti-escarres, couverture de survie, mannequin, téléphone, poignée de portes clavier et signal d'ordinateur, matériels et surfaces pour coiffeur, tatoueur etc...

Agroalimentaire : matériels et surfaces inox : sonde sans rinçage, petits matériels de découpe et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les mains du personnel (peau non lésée) autorise une désinfection durant la fabrication assurant des gains de production et réduisant le risque de contamination croisée et manuportée, le rinçage à l'eau est facultatif mais conseillé à intervalle régulier.

Industrie pharmaceutique et cosmétique : Tous matériels, paillasses et surfaces : autorise une désinfection durant la fabrication assurant des gains de production et réduisant le risque de contamination croisée et manuportée, le rinçage à l'eau est facultatif mais conseillé à intervalle régulier.





Lingette désinfectante

Bactéricide-Fongicide-Virucide

Médical-Agroalimentaire-Industrie

AA-2075

Aawyx® Lingette 2075 est une solution désinfectante bactéricide, virucide et fongicide (ARVO21SR) **homologuée par le Ministère de l'Agriculture** ou le Ministère de l'Écologie sous la référence N°2020459 dose d'emploi 100% pour ses propriétés antibactériennes.

▪ La solution d'imprégnation de la lingette 2075 est conforme à :

- la norme **bactéricide EN 1276**, temps de contact : 5 min, à 20°C, lorsqu'elle est diluée à 80 % (volume / volume) dans de l'eau dure, dans des conditions de propreté (0,3 g. / l. d'albumine bovine) vis à vis des souches de référence Enterococcus hirae CIP 58.55, Escherichia coli CIP 54.127, Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467, Staphylococcus aureus CIP 4.83, Salmonella typhimurium CIP 58.58 et Listeria monocytogenes CIP 78.38. Pour locaux de stockage (dont parois), matériels de stockage et de transport. Produits d'origine animale (POA), produits d'origine végétale (POV), TP4.
- la norme **bactéricide EN 13697**, temps de contact : 5 min, à 20°C, lorsqu'elle est diluée à 80 % (volume / volume) dans de l'eau dure, dans des conditions de propreté (0,3 g. / l. d'albumine bovine) vis à vis des souches de référence Enterococcus hirae CIP 58.55, Escherichia coli CIP 54.127, Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467, Staphylococcus aureus CIP 4.83.
- la norme **bactéricide EN 13697**, temps de contact : 5 min, à 20°C, lorsqu'elle est diluée à 80 % (volume / volume) dans de l'eau dure, en présence de 1% (volume / volume) de lait écrémé reconstitué vis-à-vis des souches de référence Enterococcus hirae CIP 58.55, Escherichia coli CIP 54.127, Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467, Staphylococcus aureus CIP 4.83.
- la norme **virucide EN 14476**, temps de contact : 30 secondes, à 20°C, à la concentration de 80%, dans des conditions de propreté contre la souche virale Influenza type A H1N1).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (cf. fiche de données de sécurité)

CONDITIONNEMENT

Réf : AA-2075 : 1 boîte Box de 1000 lingettes 200x200

Aawyx® ne peut avoir connaissance des multiples applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. Aawyx® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit à usage professionnel. Utiliser tous les produits et Biocides avec précautions. Fiche de sécurité sur demande pour les professionnels.



Réservé à usage professionnel

www.aawyx.com

BP 145 – 42300 Roanne Cedex

Tél: 04 77 67 60 39 – Fax: 04 77 67 60 63