

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE MILITAIRE

Référence : 14070

Caractéristique du garrot



- Le garrot tourniquet est un moyen sûr et efficace permettant de stopper les hémorragies sévères.
- En cas de doute ou si vous n'avez pas le temps de vérifier d'où le saignement provient ; le garrot tourniquet peut être appliqué sur les vêtements.
- Le garrot ne doit pas être appliqué sur des objets solides se trouvant dans les vêtements.
- Il peut être posé d'une seule main.
- Il est nécessaire pour **stopper une hémorragie externe** importante sur un membre
- **Verrouillage avec velcro** blanc pour indiquer l'heure de pose
- Dimensions : Longueur 1 mètre - Largeur 5cm

Conception robuste et fiable

Fabriqué avec des **matériaux de haute qualité**, ce garrot est conçu pour être **robuste** et **durable**, capable de **résister à des conditions difficiles**. Il peut être utilisé sur les bras, les mains, les jambes ou les pieds pour une utilisation polyvalente, ce qui en fait **un équipement de secours indispensable** pour contrôler efficacement la circulation sanguine.

Facile à utiliser

Le garrot tourniquet tactique est **facile à utiliser** et peut être mis en place rapidement d'une seule main pour une compression rapide et efficace. Il est également **très pratique pour les premiers soins**, offrant une solution efficace pour toutes les situations nécessitant **le contrôle d'une l'hémorragie**.

Arrêter l'hémorragie avec un garrot tourniquet

Un garrot tourniquet est un dispositif qui permet de **compresser une artère pour contrôler une**



GARROT TOURNIQUET TACTIQUE MILITAIRE

Référence : 14070

hémorragie. Il est constitué d'une **sangle**, d'un **mécanisme de serrage** et d'un **système de blocage** pour maintenir la compression.

Le garrot tourniquet est un **outil de premiers secours indispensable** pour prévenir ou **arrêter une hémorragie externe**. Il peut être utilisé pour **traiter une blessure grave** au bras, à la main, au pied et à la jambe.

Qu'est-ce qu'un garrot tourniquet tactique ?

Un garrot tourniquet tactique est un dispositif médical conçu pour arrêter le flux de sang d'une blessure grave en appliquant une pression sur le membre affecté. Il est principalement utilisé dans des situations où une hémorragie incontrôlée menace la vie du patient.

Pour contrôler efficacement l'écoulement du sang

Le Garrot tourniquet tactique est **pratique à transporter**. Il peut être **facilement rangé dans un sac à dos**, une poche de pantalon ou **une boîte de premiers soins**, ce qui en fait un équipement essentiel pour toutes les personnes soucieuses de leur sécurité.

Pourquoi utiliser un garrot tourniquet ?

Lorsqu'une artère est endommagée, il est important **d'arrêter l'écoulement** pour minimiser les dommages et empêcher une perte de sang excessive. Le garrot tourniquet est l'un des moyens les plus rapides et les plus efficaces **de contrôler une hémorragie externe en comprimant l'artère affectée**. En utilisant un garrot tourniquet en situation d'urgence, vous pouvez aider à préserver la vie d'une personne en danger jusqu'à ce qu'elle puisse recevoir des soins.

Le sang étant essentiel pour assurer le transport de l'oxygène vers les différents organes de notre corps, la gravité de la situation en cas d'hémorragie externe augmente d'autant plus si la quantité de sang perdu est importante. C'est pourquoi il est crucial d'agir le plus rapidement possible pour arrêter l'hémorragie au plus tôt.

La pose d'un garrot tourniquet fait partie **des gestes d'urgence** permettant d'arrêter un saignement important dans des conditions exceptionnelles. En effet, ce geste s'effectue uniquement dans les situations suivantes :



GARROT TOURNIQUET TACTIQUE MILITAIRE

Référence : 14070

- 1 - La compression directe à la main ou avec un pansement compressif n'est pas réalisable, la blessure est inaccessible
- 2 - La compression directe à la main ou avec un pansement compressif n'a pas été efficace.
- 3- En cas de nécessité d'avoir les mains libres pour prodiguer d'autres soins
- 4- Lors d'un accident de la route, et la personne est incarcérée dans le véhicule
- 5- En cas d'amputation
- 6- En cas d'objet planté dans le membre

En résumé, il est recommandé de positionner un garrot tourniquet uniquement si **la victime présente un cas d'hémorragie externe grave** qui ne peut pas être contrôlée par une compression locale directe.

Avantages d'un garrot tourniquet tactique

Un garrot tourniquet tactique présente plusieurs avantages lorsqu'il s'agit de contrôler rapidement et efficacement les hémorragies :

- Réduction du temps de réponse : L'utilisation d'un garrot tourniquet tactique permet d'arrêter rapidement le saignement, ce qui peut être crucial pour sauver des vies dans les situations d'urgence.
- Contrôle efficace des hémorragies : Le garrot tourniquet tactique applique une pression directe sur la blessure, comprimant les vaisseaux sanguins et arrêtant le flux de sang de manière efficace.
- Facilité d'utilisation : Les garrots tourniquets tactiques sont conçus pour être utilisés facilement, même par des personnes non médicales. Ils sont souvent dotés de mécanismes simples et rapides à mettre en place, ce qui permet de gagner un temps précieux dans les situations critiques.
- Polyvalence : Les garrots tourniquets tactiques peuvent être utilisés sur différents types de blessures et de membres, ce qui en fait un outil polyvalent dans les situations d'urgence.

Comment utiliser un garrot tourniquet ?

L'application correcte d'un garrot tourniquet tactique est cruciale pour arrêter efficacement le saignement d'une blessure. Voici les étapes de base pour appliquer un garrot tourniquet tactique de manière appropriée :

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE MILITAIRE

Référence : 14070

- Retirez tous les vêtements ou les objets qui peuvent gêner l'application du garrot tourniquet.
- Positionner la sangle autour du membre atteint, bien en amont de l'hémorragie. Assurez-vous que la sangle soit bien en contact direct avec la peau.
- Passer la sangle à travers la boucle du garrot
- Serrez fortement la boucle et verrouiller la boucle
- Tourner la poignée de torsion jusqu'à l'arrêt du saignement
- Positionnez la poignée de torsion dans le crochet fixe
- Notez l'heure de pose du garrot.

Considérations importantes lors de l'utilisation d'un garrot tourniquet tactique

Lors de l'utilisation d'un garrot tourniquet tactique, il est essentiel de prendre en compte certaines considérations importantes pour assurer une utilisation appropriée et éviter les complications :

- **Durée maximale d'utilisation** : Un garrot tourniquet tactique ne doit pas être laissé en place pendant une période prolongée. Il est recommandé de ne pas dépasser 2 heures afin de prévenir les dommages tissulaires et les complications.
- **Vérification régulière de la circulation sanguine** : Pendant l'utilisation d'un garrot, il est important de surveiller régulièrement la circulation sanguine distale pour s'assurer qu'elle n'est pas compromise. Si des signes de mauvaise circulation apparaissent, le garrot doit être desserré légèrement pour rétablir le flux sanguin.
- **Formation appropriée à l'utilisation du garrot** : Il est crucial de recevoir une formation adéquate sur l'utilisation correcte d'un garrot tourniquet tactique. Cela garantit une utilisation appropriée et minimise les risques de complications ou de blessures supplémentaires.
- **Documentation et rapport** : Lorsque vous utilisez un garrot tourniquet tactique, il est important de documenter toutes les informations pertinentes, telles que l'heure de l'application, le membre concerné et la pression appliquée. Ces informations seront utiles pour les professionnels de la santé ultérieurement et peuvent aider à guider le traitement approprié.
- **Suivi médical** : Après l'utilisation d'un garrot tourniquet tactique, il est essentiel de chercher rapidement des soins médicaux pour évaluer la blessure et prendre les mesures nécessaires. Un suivi médical approprié permet de minimiser les risques d'infections ou d'autres complications liées à la blessure.