

Lingettes Désinfectantes Inodores Aawyx®



Lingettes pour le nettoyage, la décontamination et la désinfection par contact de toutes les surfaces fragiles, matériels et des mains sur peau saine.

Lingettes inodores à usage unique pour le nettoyage, la décontamination et la désinfection par contact des équipements, de l'instrumentation, des dispositifs médicaux non invasifs, de toutes les surfaces hautes, les matériels même les plus fragiles...

Particulièrement adaptées en services de néonatalogie : application possible sur les couveuses en présence de l'enfant.

Les composants entrant dans la composition du produit d'imprégnation de Aawyx® Lingettes Inodores font partie de la liste positive des composants autorisés pour le contact alimentaire.

Bactéricide conforme aux normes européennes EN 1040, NF EN 1276 conditions de saleté, normes AFNOR NF T 72-151 spectre 5, NF T 72-171, NF T 72-190. La lingette présente à l'utilisation une activité sur les bactéries *Staphylococcus aureus* CIP 53154, *Enterococcus hirae* CIP 5855, *Pseudomonas aeruginosa* CIP A22, *Escherichia coli* CIP 54127, et une activité sur *Candida albicans* IP 1180 79 selon une méthodologie mise au point et validée par un laboratoire accrédité COFRAC, dérivée de la norme AFNOR NF T 72-190. **Fongicide** conforme à la norme NF EN 1275 NF EN 1650 conditions de saleté sur *Candida Albicans*. **Virucide** sur Poliovirus, Rotavirus, Adenovirus, Herpes Virus selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, actif sur virus VHB. Inactivation du VIH en 5 minutes (M.A. WAINBERG 1990).

Composition du liquide d'imprégnation : Peroxydes, Ammoniums Quaternaires synergisés, Ethanol à 95°<5%, Excipients

Activité microbiologique:

Ingrédients / Composition:

Dose d'emploi:

Contact alimentaire:



Conditionnement : *



AA-2071 - 6 boîtes de 120 (162x400mm)