

# Solo Extra 998

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Latex naturel
- Longueur (cm) 30
- Epaisseur (mm) 0.10
- Poignet Bord roulé
- Couleur Naturel
- Finition intérieure Chlorinée
- Finition extérieure Lisse avec bout des doigts granités
- Taille / EAN 6 7 8 9
- Conditionnement 100 gants/boîte - 1000 gants/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone



## RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334




### Légendes



**DANGERS MÉCANIQUES EN 388**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

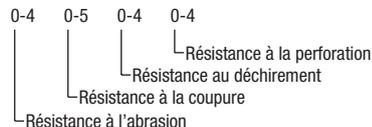

**PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374**



**MICRO-ORGANISMES EN 374**



**CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421**



**PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374**


Code Produit  
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%




**DANGERS DU FROID EN 511**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

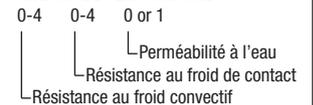

**CHALEUR ET FEU EN 407**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

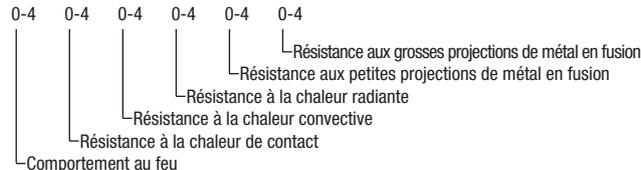

Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONNEL

# Solo Extra 998

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.
- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.
- Protection adaptée aux usages de courte durée.

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

### Industrie mécanique/automobile

- Assemblage de petites pièces non grasses

### Santé

- Usages courants en hôpitaux et cliniques

### Laboratoire

- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision

## CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

### Instructions pour l'utilisation

- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, thiazoles et dithiocarbamates.
  - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
  - Retourner le bord de la manchette pour éviter la pénétration de liquide.
  - Ces gants sont conçus pour un usage unique.
  - Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.
- Conditions de stockage**  
Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de l'humidité et éloignés de sources de chaleur et d'installations électriques.

## LÉGISLATION

Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).

- Attestations CE de type  
0075/014/162/11/04/0210 ex 01/11/04
- Délivré par l'organisme agréé nr  
0075  
C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité  
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS