



Masque chirurgical

MATERIAU

- Polypropylène non-tissé 25 g/m², 3 plis
- 2 élastiques sans latex
- Barrette nasale d'ajustement
- Filtration haute performance
- Hypoallergénique, doux et confortable
- Taille unique

DIMENSIONS

- 17,5 x 9,5 cm

REGLEMENTATION

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745
- Norme EN14683 : 2019 Type IIR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant de mettre le masque, les mains doivent être lavées avec un gel hydroalcoolique ou de l'eau et du savon
- Placer les élastiques autour des oreilles. Couvrir la bouche et le nez avec le masque.
- Ajuster le masque avec la barrette nasale pour l'adapter au visage.
- Laisser le moins d'espace possible entre le masque et le visage
- Éviter de toucher le masque lors de son utilisation
- Remplacer le masque lorsqu'il devient humide
- Jeter le masque après usage.

STOCKAGE

- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

CONDITIONNEMENT

- Boîte distributrice de 50 masques.
- Carton de 2 000.

