

HP derm



Type:

Lingettes désinfectantes et nettoyantes pour mains, objets, surfaces et dispositifs médicaux non invasifs de classe 1, imprégnées d'une solution bactéricide, levuricide et active sur certains virus*.

Usage:

Les lingettes HPDERM ont une action rapide et permettent de désinfecter les mains, les surfaces, les ustensiles personnels (thermomètre, pinces à ongles, rasoirs, ciseaux ...), les objets publics et professionnels (téléphones, poignées de porte, abattant de W.C., sanitaires ...) et des Dispositifs Médicaux classe 1 (stéthoscopes, fauteuils roulants, fauteuils de dentistes, lits médicaux, tables d'examen ...).

Les lingettes HPDERM s'utilisent à l'hôpital, au cabinet médical, au cabinet dentaire, au centre de soins et prélèvements, au laboratoire d'analyses, dans les services d'urgences, SAMU, pompiers...

Les lingettes s'utilisent également en voyage, en voiture, en avion, au bureau, à la maison...

L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage, préalable à toute désinfection. L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de stérilisation des instruments pouvant être stérilisés par un procédé approprié.

Les lingettes sont conformes à l'Arrêté du 8 septembre 1999 (et textes ultérieurs), concernant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Dans ce cas, pour les surfaces en contact ultérieur avec des aliments, il est nécessaire de réaliser un rinçage préalable à l'eau potable.

Les lingettes sont également autorisées pour la décontamination des mains en milieu alimentaire.

Propriétés microbiologiques de la solution d'imprégnation

Bactéricidie: EN 1040 (1 min)
EN 1040 (1 min, SARM)
EN 1276 (30 secondes, conditions de propreté)
EN 1276 (5 min)
prEN 13727 (30 secondes, conditions de propreté)
EN 13727 (5 min, conditions de propreté)
EN 13697 (5 min, conditions de propreté)
EN 14561 (5 min, conditions de propreté)
Selon le protocole de la norme européenne NF EN 1500, réduction de 99,8% (1 min, *Escherichia coli*).

Levuricidie: EN 1275 (*Candida albicans*, 5 min)
EN 13624 (*Candida albicans*, 5 min, conditions de propreté)
EN 13697 (*Candida albicans*, 5 min, conditions de propreté)
EN 1650 (*Candida albicans*, 30 sec, conditions de propreté ; *Trichophyton mentagrophytes*, 15 min, conditions de propreté).

Virucidie* : actif sur *Rotavirus* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (5 min)
actif sur *Parainfluenza 3 (paramyxovirus/virus humain)* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (15 min)
actif sur *H5N1* (virus de la grippe aviaire)
actif sur H1N1 selon la méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 30 sec
actif sur *Herpès virus* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
actif sur *HIV* selon la norme NF T 72-180 en 30 sec
actif sur *PRV* (virus modèle Hépatite B) selon le protocole de la norme NF T 72-180 en 30 sec
actif sur *BVDV* (virus modèle Hépatite C) selon le protocole de la norme NF T 72-180 en 30 sec.



Toutes les fiches techniques, fiches de sécurité SORIFA sur Internet : <http://www.sorifa.com/>

Mode d'action:

L'utilisation sous la forme de lingettes permet à la fois l'action nettoyante et désinfectante par le produit actif et l'essuyage des salissures. L'excipient alcoolique, tout en participant à l'activité permet un séchage rapide et donne un excellent confort d'utilisation.

Mode d'emploi:

Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'amorce pas sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.

Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, les poignets et la pulpe des doigts, pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

Ingrédients :

Support : Non-tissé, cellulose/viscose imprégné d'une solution nettoyante et désinfectante

Substances actives de la solution d'imprégnation :

Ethanol CAS 64-17-5 (47 mg/g), chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 mg/g), Acide D-gluconique (chlorhexidine digluconate) CAS 18472-51-0 (1,2 mg/g).

Produit biocide TP1 et TP2.

Précautions d'emploi:

Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement. Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, la peau irritée ou une plaie. Tenir hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois.

En cas d'ingestion, évacuer le corps étranger, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Contacter le centre anti-poison le plus proche.

Ce produit est réservé à l'usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité. Ce produit ne se substitue pas aux méthodes classiques de désinfection. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Présentation:

Boîte distributrice de 100 lingettes (PE Recyclable), Format d'une lingette : 125 x 205 mm.

Disponible en pharmacie. Code ACL n° 7706536.

Compatibilités:

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux sauf le plexiglas

Autres informations:

Les informations que ce document contient correspondent à l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.

Ces informations sont conformes à la législation en vigueur et sont données de bonne foi.

Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur les propriétés précises de ces produits ou leur application à une utilisation déterminée.

L'attention des utilisateurs est donc tout particulièrement attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.



Toutes les fiches techniques, fiches de sécurité SORIFA sur Internet : <http://www.sorifa.com/>