

# Mezzo System FOX<sup>®</sup> Eye

## und Augenspülset FOX



- ❶ Im Falle einer Augenverletzung wird eine der zwei 500ml Flaschen mit steriler Augenspülflüssigkeit eingesetzt, um einen hohen Spüleffekt zu erzielen. Der Deckel wird kurz gedreht, dadurch öffnet sich das Siegel. Der Deckel wird entfernt und es kann mit der Spülung begonnen werden. Die Öffnung der Flasche ermöglicht eine sehr gezielte Spülung des Auges. Fremdkörper sollten zur Nase hin ausgespült werden. Die Flasche kann aufgehängt werden, um eine fortwährende Spülung z.B. während eines Transports zu gewährleisten. Die Flüssigkeit ist eine 0,9 prozentige Kochsalzlösung, auch isotone Lösung genannt, die zu 100% dem Augenwasser nach empfunden ist.
- ❷ Bei konkret zu lokalisierenden Partikeln hilft eine der Miniflaschen mit isotoner Lösung zum + Ausspülen des Fremdkörpers. Der Behandelnde kann exakt spülen und ohne Berührung das Auge von Partikeln befreien.
- ❸
- ❹ Ein Spiegel erleichtert die Eigenbehandlung und bietet die Möglichkeit nach der Anwendung zu kontrollieren, ob alle Fremdkörper ausgespült wurden.
- ❺ Augenverbände und weiche Einmaltücher helfen bei der Erstversorgung von Augenverletzungen.

**Suchen Sie nach der Erstversorgung umgehend einen Arzt auf!**

Erich Voss GmbH

